

	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	Doküman No	DMC.TL.49
	PIEZO KEMİK TESTERESİ CİHAZI KULLANIM BAKIM VE ONARIM TALİMATI	Yayın Tarihi	14.10.2024
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	---
		Sayfa No	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ:

Bu talimatname, Piezo Kemik Testeresi cihazlarının kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili işleyiş sürecini belirlemek için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM:

Bu talimat, Piezo Kemik Testeresi cihazlarının kullanan personelleri ve Teknik Bakım Onarım biriminde çalışan personelleri kapsar.

3. TANIMLAR:

Cihazların bakım onarımları Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri tarafından Periyodik Bakım Planı'nda belirlenen dönemlerde yapılır.

4. SORUMLULAR:

Cihazları kullanan personeller ve Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri, bu talimatlara uygun olarak işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Cihazları kullanan personeller, cihazların bakım onarımlarının düzenli bir şekilde yaptırılması için yönlendirme yapmalıdır.

Denetim, hastane yönetimi veya ilgili birimler tarafından periyodik olarak yapılmalıdır.

5. FAALİYET AKIŞI:

5.1. CİHAZIN KULLANIMI:

5.1.1. Cihaz güç kaynağına takılır.

5.1.2. Açma- kapama düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.

5.1.3. Cihaz su ile çalıştığı için serum ve ara bağlantıları takılır.

5.1.4. Cihazın mikromotor kablosu, piezo ucu ve anahtarı steril olarak açılır. İşlem ucu anahtar yardımıyla sıkılarak işleme hazır duruma getirilir. Cihaz pedal sistemiyle kontrol edilerek çalışır.

5.1.5. İşlemi bittikten sonra cihaz üzerindeki led ışıklı ekranda "clean" yazısı çıkınca ok işaretiye uzunca basılır. Distile suyun içerisine daldırılan serum bağlantı ucu içerisindeyken pedala basılarak içerisinde kalan tuzlu su bu şekilde temizlenmiş olur.

5.1.6. Cihaz anahtarı, ucu ve kafes şeklindeki muhafaza içerisine konan mikromotor kablosu otoklava gönderilir.

5.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

5.2.1. Cihazın temizliği yapılır.

5.2.2. Cihazın çalışması kontrol edilir.

5.2.3. Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri cihazın bakım onarım işlemini yaptıktan sonra HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) programı üzerindeki bakım onarım formundaki gerekli bilgileri doldurarak yapılan işlemleri kayıt altına alır.

5.2.4. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda HBYS (Hasta Bilgi Yönetim Sistemi) programındaki İş İstek Belgesi formunu doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir. Arıza bildirimi sonrasında Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri cihaz üzerinde incelemeler yaparak arızanın hastane imkanları ile giderilip giderilemeyeceği tespitini yapar. Hastane imkanları ile giderilecek arızalarda; arıza giderilir ve cihaz kullanıma sunulur. Hastane imkanları ile giderilemeyecek arızalarda ise; cihaz hastane dışında bulunan teknik servis ile irtibata geçilecek arızanın giderilmesi sağlanır. Eğer cihazdaki arıza hiçbir şekilde giderilemeyecek durumda ise; HEK prosedürü işleme konur.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Taşınır Demirbaş Malzemeler Hek Prosedürü