



DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PRP SANTRİFÜJ KULLANIM BAKIM VE ONARIM TALİMATI

Doküman No

DMC.TL.50

Yayın Tarihi

14.10.2024

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

Sayfa No

Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ:

PRP santrifüj çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanması.

2. KAPSAM:

Bu talimat Teknik Bakım Onarım Servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. TANIMLAR:

4. SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulamasından Teknik Bakım Onarım Servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

5. FAALİYET AKIŞI:

5.1.

5.1.1 CİHA Tüpler karşılıklı denge olacak şekilde cihazın rotoruna yerleştirilir. Cihazın kapağı sıkıca kapatılır.

5.1.2 PRP protokolüne uygun hız (rpm) ve süre ayarlanır.

5.1.3 Start tuşuna basılır ve cihaz bitene kadar kapağı açılmaz.

5.1.4 Santrifüj tamamlandığında tüpler dikkatle çıkarılır.

5.1.5 Tüpteki üstte kalan plazma kısmı ile trombosit zengin tabaka dikkatlice ayrılır. Kullanılacak PRP steril enjektöre çekilir.

5.1.6 Elde edilen PRP, hemen tedavi edilecek bölgeye enjekte edilir.

5.1.7 Bekletilmesi önerilmez, çünkü trombositler kısa sürede aktivitesini kaybeder

5.1.8 Cihazın dış yüzeyi %70 alkol veya uygun dezenfektan ile silinir.

5.1.9 Rotor ve tüp yuvaları tüp kırığı veya sıvı sızıntısı açısından kontrol edilir.

5.1.10 Her kullanım sonrası cihaz boş çalıştırılmadan kapatılır ve fişi çekilir.

5.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

5.2.1. Teknik Servis Personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir. PL 006 no'lu Periyodik Bakım Planını hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

5.2.2. AYLIK BAKIM

5.2.2.1. Fiziki temizliği yapılır.

5.2.2.2. Çalışması kontrol edilir.

5.2.2.3. Teknik Servis Sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için ENLİL programı üzerindeki arıza talebi formu düzenlenir. Bu form üzerine bakım ve onarım sonrası gerekli bilgiler işlenir.

5.2.2.5. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda bilgisayarda kurulu olan ortak modül üzerinden İş İstek Belgesi doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir. Arızalıdır kartı cihaz üzerine asılır.

5.2.2.5 Teknik Servis Sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.