

	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	Doküman No	DMC.TL.53
	ULTRASONİK CAVİTRON CİHAZI KULLANIM BAKIM VE ONARIM TALİMATI	Yayın Tarihi	14.10.2024
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	---
		Sayfa No	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ:

Bu talimatname, Ultrasonic Cavitron cihazlarının kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili işleyiş sürecini belirlemek için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM:

Bu talimat, Ultrasonic Cavitron cihazlarını kullanan personelleri ve Teknik Bakım Onarım biriminde çalışan personelleri kapsar.

3. TANIMLAR:

Cihazların bakım onarımları Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri tarafından Periyodik Bakım Planı'nda belirlenen dönemlerde yapılır.

4. SORUMLULAR:

Cihazları kullanan personeller ve Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri, bu talimatlara uygun olarak işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Cihazları kullanan personeller, cihazların bakım onarımlarının düzenli bir şekilde yaptırılması için yönlendirme yapmalıdır.

Denetim, hastane yönetimi veya ilgili birimler tarafından periyodik olarak yapılmalıdır.

5. FAALİYET AKIŞI:

5.1. CİHAZIN KULLANIMI:

5.1.1. Cihazın fişi prize takılır.

5.1.2. Cihazın su bağlantısı kontrol edilir.

5.1.3. Cihazın ayak kumandası kontrol edilir.

5.1.4. Cihazın güç kablosu kontrol edilir.

5.1.5. Cihaz açma – kapama düğmesinden açılır.

5.1.6. Cihazın ön panelindeki güç butonu ile güç seviyesi belirlenir.

5.1.7. Cihazın ön panelindeki su butonuna basılarak sulumu yoksa susuz mu çalışacağına karar verilir. (lamba yanık konumda sulu çalışılacağına göstergesidir.)

5.1.8. Cihazın sağ tarafındaki düğmeden su ayarı yapılır.

5.1.9. Cihazın başlığına kavitron ucu ve sıkma anahtarı ile klik sesi gelene kadar döndürülür.

5.1.10. İşlem bittikten sonra kendi anahtarı yardımıyla kavitron ucu çevirilerek çıkarılır.

5.1.11. Dezenfekte edildikten sonra paketlenip merkezi sterilizasyon ünitesine gönderilir.

5.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

5.2.1. Cihazın temizliği yapılır.

5.2.2. Cihazın çalışması kontrol edilir.

5.2.3. Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri cihazın bakım onarım işlemini yaptıktan sonra HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) programı üzerindeki bakım onarım formundaki gerekli bilgileri doldurarak yapılan işlemleri kayıt altına alır.

5.2.4. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda HBYS (Hasta Bilgi Yönetim Sistemi) programındaki İş İstek Belgesi formunu doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir. Arıza bildirimi sonrasında Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri cihaz üzerinde incelemeler yaparak arızanın hastane imkanları ile giderilip giderilemeyeceği tespitini yapar. Hastane imkanları ile giderilecek arızalarda; arıza giderilir ve cihaz kullanıma sunulur. Hastane imkanları ile giderilemeyecek arızalarda ise; cihaz hastane dışında bulunan teknik servis ile irtibata geçilecek arızanın giderilmesi sağlanır. Eğer cihazdaki arıza hiçbir şekilde giderilemeyecek durumda ise; HEK prosedürü işleme konur.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Taşınır Demirbaş Malzemeler Hek Prosedürü