



DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

VEKTÖR CİHAZI KULLANIM BAKIM VE ONARIM TALİMATI

Doküman No

DMC.TL.54

Yayın Tarihi

14.10.2024

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

Sayfa No

Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ:

Vektör cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanması.

2. KAPSAM:

Bu talimat Teknik Bakım Onarım Servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. TANIMLAR:

4. SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulamasından Teknik Bakım Onarım Servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

5. FAALİYET AKIŞI:

5.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

5.1.1 Cihazın fişini takın, düz ve kuru bir yüzeye yerleştirin.

5.1.2 Su tankını distile su veya üreticinin önerdiği solüsyon ile doldurun. Toz/ilaç haznesine (varsa) profilaksi tozunu ekleyin. Uygun ultrasonik el aleti ucu (scaler tip) seçin ve takın.

5.1.3 Power (güç) düğmesine basın.

5.1.4 Fonksiyon modlarından (G = gingival, P = periodontal, E = endodontik, C = clean, vb.) yapılacak işleme uygun olanı seçin.

5.1.5 El aletini hastanın dişine temas ettirmeden önce pedala hafif basarak su akışını kontrol edin..

5.1.6 İş bitince cihazı temizleme moduna alın (Clean / Flush), 1-2 dakika temiz su akıtın.

5.1.7 El aleti ucunu çıkarın, sterilizasyon talimatına göre temizleyin.

5.1.8 Su haznesini boşaltın ve kuru bırakın.

5.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

5.2.1. Teknik Servis Personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir. PL 006 no'lu Periyodik Bakım Planını hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

5.2.2. AYLIK BAKIM

5.2.2.1. Fiziki temizliği yapılır.

5.2.2.2 Çalışması kontrol edilir.

5.2.2.3. Teknik Servis Sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için ENLİL programı üzerindeki arıza talebi formu düzenlenir. Bu form üzerine bakım ve onarım sonrası gerekli bilgiler işlenir.

5.2.2.4. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda bilgisayarda kurulu olan ortak modül üzerinden İş İstek Belgesi doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir. Arızalıdır kartı cihaz üzerine asılır.

5.2.2.5 Teknik Servis Sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.