

	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	Doküman No	DMC.TL.39
	ASPIRATÖR CİHAZI KULLANIM BAKIM VE ONARIM TALİMATI	Yayın Tarihi	14.10.2024
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	---
		Sayfa No	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ:

Bu talimatname, aspiratör cihazlarının kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili işleyiş sürecini belirlemek için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM:

Bu talimat, aspiratör cihazlarını kullanan personelleri ve Teknik Bakım Onarım biriminde çalışan personelleri kapsar.

3. TANIMLAR:

Cihazların bakım onarımları Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri tarafından Periyodik Bakım Planı'nda belirlenen dönemlerde yapılır.

4. SORUMLULAR:

Cihazları kullanan personeller ve Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri, bu talimatlara uygun olarak işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Cihazları kullanan personeller, cihazların bakım onarımlarının düzenli bir şekilde yaptırılması için yönlendirme yapmalıdır.

Denetim, hastane yönetimi veya ilgili birimler tarafından periyodik olarak yapılmalıdır.

5. FAALİYET AKIŞI:

5.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

5.1.1. Cihazın fişi prize takılır.

5.1.2. ON yazılı düğmeye basılıp çalıştırılır.

5.1.3. Uzun aspiratör hortumuna aspiratör ucu takılır.

5.1.4. Hastanın ağız veya burnunda biriken sekresyon boşaltılır.

5.1.5. Distile su dolu şişe içine aspiratör ucu batırılır.

5.1.6. Hortumun içindeki sekresyon büyük kavanoza boşaltılır işlem iki üç kez tekrarlanır.

5.1.7. İşlem bittikten sonra OFF düğmesinden makina kapatılır.

5.1.8. Kullanılan sonda atılır ve şişeler çıkartılıp temizlenir.

5.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

5.2.1. Fiziki temizliği yapılır.

5.2.2. Çalışması kontrol edilir.

5.2.3. Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri cihazın bakım onarım işlemini yaptıktan sonra HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) programı üzerindeki bakım onarım formundaki gerekli bilgileri doldurarak yapılan işlemleri kayıt altına alır.

5.2.4. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda HBYS (Hasta Bilgi Yönetim Sistemi) programındaki İş İstek Belgesi formunu doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir. Arıza bildirimi sonrasında Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri cihaz üzerinde incelemeler yaparak arızanın hastane imkanları ile giderilip giderilemeyeceği tespitini yapar. Hastane imkanları ile giderilecek arızalarda; arıza giderilir ve cihaz kullanıma sunulur. Hastane imkanları ile giderilemeyecek arızalarda ise; cihaz hastane dışında bulunan teknik servis ile irtibata geçilecek arızanın giderilmesi sağlanır. Eğer cihazdaki arıza hiçbir şekilde giderilemeyecek durumda ise; HEK prosedürü işleme konur.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Taşınır Demirbaş Malzemeler Hek Prosedürü