

	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	Doküman No	DMC.TL.46
	LAZER CİHAZI KULLANIM BAKIM VE ONARIM TALİMATI	Yayın Tarihi	14.10.2024
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	---
		Sayfa No	Sayfa 1 / 2

1. AMAÇ:

Bu talimatname, Lazer cihazlarının kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili işleyiş sürecini belirlemek için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM:

Bu talimat, Lazer cihazlarının kullanan personelleri ve Teknik Bakım Onarım biriminde çalışan personelleri kapsar.

3. TANIMLAR:

Cihazların bakım onarımları Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri tarafından Periyodik Bakım Planı'nda belirlenen dönemlerde yapılır.

4. SORUMLULAR:

Cihazları kullanan personeller ve Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri, bu talimatlara uygun olarak işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Cihazları kullanan personeller, cihazların bakım onarımlarının düzenli bir şekilde yaptırılması için yönlendirme yapmalıdır.

Denetim, hastane yönetimi veya ilgili birimler tarafından periyodik olarak yapılmalıdır.

5. FAALİYET AKIŞI:

5.1. CİHAZIN KULLANIMI:

5.1.1. Cihaz bataryalı olup fişsiz kullanılır. Batarya boşalmadıkça fişle kullanılması gerekmez. Cihaz üzerinde bulunan güç kaynağı işareti boş gözüktürse minimum 6-18 saat güç kaynağına takılı şarj edilir.

5.1.2. Açma- kapama düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.

5.1.3. Lazer başlığına takılan kalem ucu ve lazerin kesici-yakıcı ucu takılır.

5.1.4. Ekranın ortasında herhangi bir bölgeye bir kez dokunulur.

5.1.5. Ekranda gözüken dokunmatik alana üç haneli şifre girilir. (örn:888)

5.1.6. Girilen şifreden sonra ekranda gözüken sembollerden biri yapılacak işleme göre dokunarak seçilir.

5.1.7. Tekrar ekranda gözüken başlıklardan işleme göre tekrar seçim yapılır.

5.1.8. Ekranın kenarlarında kırmızı ışık yanar. Seçilen işlemin yapılabilmesi için cihaz üzerinde orta kısımda bulunan düğmeye bir kez dokunulur. Cihazın kenarında yeşil ışık yanmaya başlayınca kullanıma hazır olduğunu gösterir.

5.1.9. Kablosuz pedal üzerinde bir kez basılınca yaylı açılma sistemi ile pedal kullanım pozisyonuna getirilir.

5.1.10. Hastaya uygulama yapmak için pedala aralıklarla basmak yeterli olacaktır.

5.1.11. Non-steril olan lazer uçları bitene kadar defalarca dezenfekte edilerek kullanılabilir.

5.1.12. Otoklava giren parçası sadece ısıya dayanıklı olan kalem ucudur.

5.1.13. Kullanımı bittikten sonra cihaz açma -kapama düğmesinden kapatılır. Fişi takılı ise cihazın güç kaynağı bağlantısı kesilir.

5.1.14. Kablosu ve devamında bulunan kalem ucun takılı olduğu bölge dezenfekte edilir.

5.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

5.2.1. Cihazın temizliği yapılır.

5.2.2. Cihazın çalışması kontrol edilir.

5.2.3. Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri cihazın bakım onarım işlemini yaptıktan sonra HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) programı üzerindeki bakım onarım formundaki gerekli bilgileri doldurarak yapılan işlemleri kayıt altına alır.

	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	Doküman No	DMC.TL.46
	LAZER CİHAZI KULLANIM BAKIM VE ONARIM TALİMATI	Yayın Tarihi	14.10.2024
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	---
		Sayfa No	Sayfa 2 / 2

5.2.4. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda HBYS (Hasta Bilgi Yönetim Sistemi) programındaki İş İstek Belgesi formunu doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir. Arıza bildirimi sonrasında Teknik Bakım Onarım Birimi personelleri cihaz üzerinde incelemeler yaparak arızanın hastane imkanları ile giderilip giderilemeyeceği tespitini yapar. Hastane imkanları ile giderilecek arızalarda; arıza giderilir ve cihaz kullanıma sunulur. Hastane imkanları ile giderilemeyecek arızalarda ise; cihaz hastane dışında bulunan teknik servis ile irtibata geçilecek arızanın giderilmesi sağlanır. Eğer cihazdaki arıza hiçbir şekilde giderilemeyecek durumda ise; HEK prosedürü işleme konur.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Taşınır Demirbaş Malzemeler Hek Prosedürü